


NORTH 1 MASK

Máscara Social Reutilizável

Nível 2

Tamanho Único

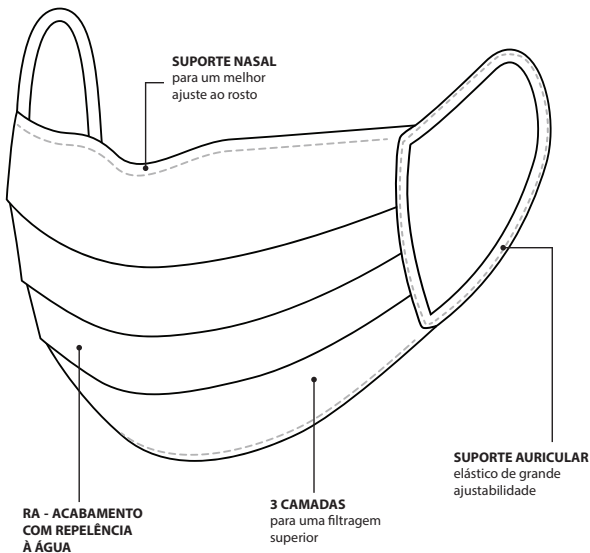

B



a



b



c



d

Instruções de uso

1. Esta máscara deve ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas, e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo do Covid-19;
2. Higienize as mãos com água e sabão ou com uma solução à base de álcool (a);
3. Coloque a máscara com a face interna virada para o rosto (b);
4. Ajuste a máscara de forma a cobrir o nariz, boca e queixo (c);
5. Ajuste a extremidade rígida da máscara ao nariz (c);
6. Lave a máscara a cada utilização consoante instruções (d);
7. Espere que a máscara seque completamente após a lavagem antes de a utilizar;
8. Não usar por períodos muito prolongados;
9. Remova pelos elásticos, dobre ao meio com o lado de fora virado para dentro e isole até lavar;

MÁXIMO ATÉ 5 LAVAGENS

A máscara deve ser usada bem seca depois de lavada, sugerimos o uso de detergente neutro.

A máscara molhada/ húmida diminui a proteção da máscara.

A máscara só pode ser usada por outra pessoa após lavagem.

Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada.

Ao fim da utilização diária recomendada ou sempre que regressar a casa a máscara deve ser lavada antes de ser reutilizada.

