

# NORTH 1 MASK

Mascarilla social reutilizable

Nivel 2


Tamaño unico



MASKS



5 WASHING CYCLES PROFESSIONAL USE (LEVEL 2)

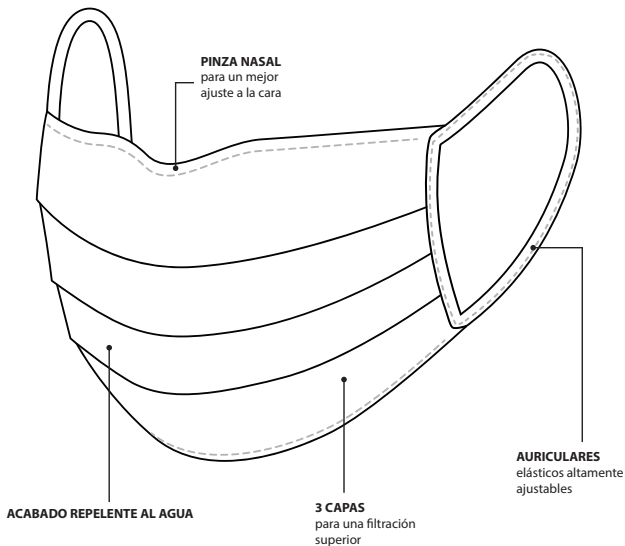

B



a



b



c



d

## Instrucciones de uso

1. Esta mascarilla debe usarse como complemento de las medidas recomendadas de protección e higiene, y de las reglas de distancia social, que son fundamentales para el control de Covid-19;
2. Lávese las manos con agua y jabón o con una solución a base de alcohol (a);
3. Póngase la mascarilla con la cara interna hacia la cara (b);
4. Ajuste la mascarilla para cubrir la nariz, la boca y el mentón (c);
5. Ajuste el extremo rígido de la mascarilla a la nariz (c);
6. Lave la máscara con cada uso de acuerdo con las instrucciones (d);
7. Espere a que la mascarilla se seque por completo después de lavarla antes de usarla;
8. No utilizar durante períodos muy largos;
9. Retirar con bandas elásticas, doblar por la mitad con el exterior hacia adentro y aislar hasta lavar;

## MÁXIMO HASTA 5 LAVADO

La mascarilla debe usarse muy seca después del lavado, sugerimos el uso de detergente neutro. La mascarilla húmeda disminuye la protección de la mascarilla. La mascarilla solo puede ser utilizada por otra persona después del lavado. Si accidentalmente moja su máscara, reemplácela por una seca lo antes posible. La mascarilla húmeda debe lavarse antes de volver a usarse. Al final del uso diario recomendado o cada vez que regrese a casa, la mascarilla debe lavarse antes de reutilizarse.

